



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
美测MC用户手册
USER MANUAL




www.meicet.com



美测 开启肌肤数据检测时代
MEICET OPEN THE ERA OF SKIN DATA DETECTION



CONTENTS

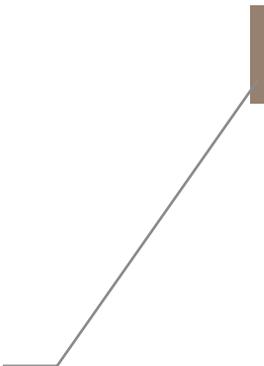

1. 仪器简介	02
2. 仪器规格	03
3. 仪器配件及安装	04
4. 软件的安装	06
5. 日常维护	08
6. 贮存与运输	09
7. 设备异常处理	10
8. 售后保修	11

INTRODUCTION

仪器简介

MC880运用多光谱成像分析技术,使用日光,交叉偏振光,平行偏振光,UV,伍氏光模式,全方位呈现肌肤问题,新增了红素、棕区、绿图分析模式,直观体现了皮肤表面和深层的问题,并进行对比,让客户迅速了解皮肤状况,配合云端分析算法,为客户推荐相应的治疗方案和产品。配合美测独有的最新的联网系统云端储存科技,可以永久保存客户资料。



PRODUCT SPECIFICATION

仪器规格

仪器型号	美测MC-880
照明模式	日光 交叉偏振 平行偏振 UV(紫外光) Wood's(伍氏光)
照明科技	固态LED
额定输入功率	DC24V 2A
功耗	40W
重量	17KG
仪器尺寸	400(长)x430(宽)x550(高)
包装尺寸	564(长)x505(宽)x440(高)
使用环境温度	5~40°C

ACCESSORIES AND INSTALLATION 仪器配件及安装



底座




主机




下巴拖




电源适配器

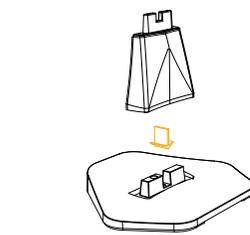


①将支架固定在底座上，拧紧螺丝。

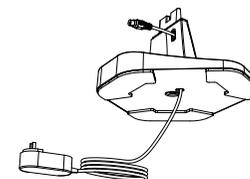


②将电源线从下往上穿过底座及支架。

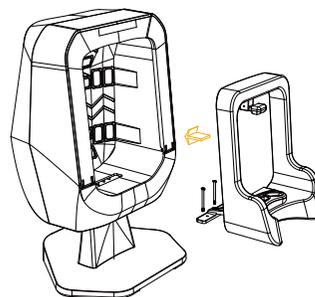

④将下巴托部件固定在支架顶端，拧紧螺丝。

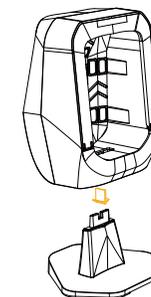


③将机壳从上往下固定在支架上，注意正反。

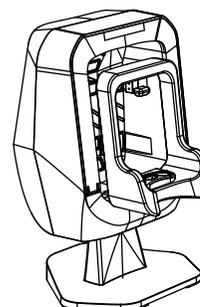

⑤安装成功



INSTALLATION OF SOFTWARE 软件的安装

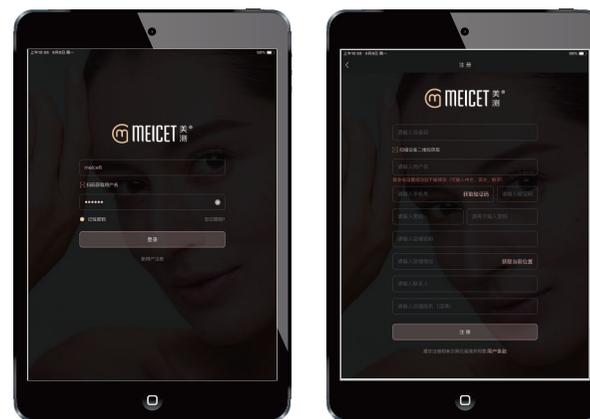


系统要求	iOS系统
储存内存要求	32G以上

点击注册后,注册页面扫描仪器后方二维码获取唯一设备号,完善一下信息后填写手机获取短信验证码后输入点击提交注册,在登录页面输入新创建的用户名和密码即可登陆,使用流程请扫描二维码,观看视频。



扫二维码 看操作视频

MAINTENANCE 日常维护

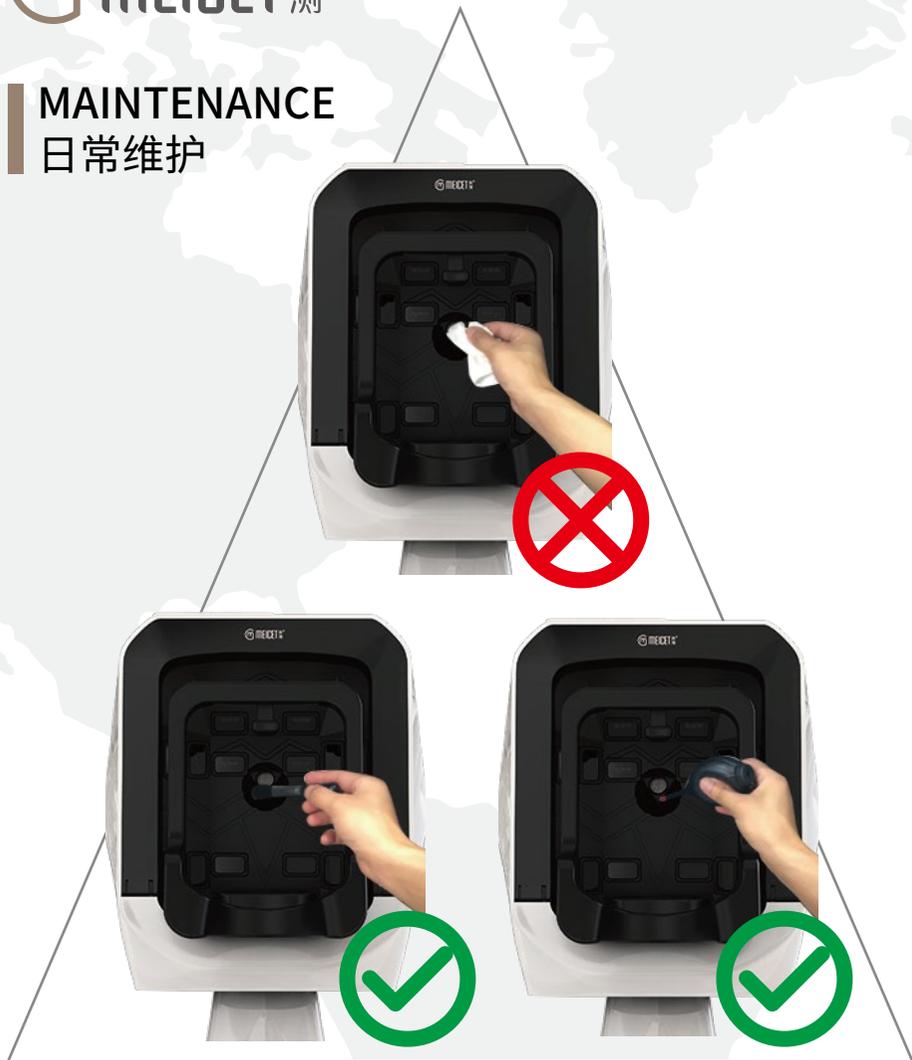

1. 如灯源部分有残留物请勿直接用手擦拭, 请用清洁气吹或纯棉镜头擦拭布轻擦。
2. 日常操作中仪器用电流程应先插DC仪器部分再将AC三角插头连接到排插。
3. 在短时间不使用机器的情况下, 只需要正常退出APP即可, 仪器主机无需断电, 一定时间内会自动进入待机休眠状态, 二次启动APP后, 主机自动进入工作状态。

STORAGE AND TRANSPORTATION 贮存与运输



本设备为精密设备, 在搬运过程中
请轻放、勿重压、进水

1. 运输前应关掉电源开关, 拔出电源线插头。
2. 注意二次运输时请将原配件按照包装上的卡位口标准摆放。
3. 移动面部肌肤分析仪重新安置在一个水平位置上。
4. 运输时应注意轻放、防潮、防湿。

运输与储存环境要求

1. 环境温度: $-15\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。
2. 相对湿度: 低于90%, 无结露。
3. 大气压强: $500\sim 1060\text{hPa}$ 。



储存注意事项

1. 储存时不要存放在阳光直晒或淋雨的地方。
2. 仪器储存在高温及高湿的地方, 可能会损坏仪器的性能。
3. 注意避免运输到储存区域的过程中温度的急剧变化, 导致结露。
4. 库房储存时, 库内应具有必要的温湿度测定仪、适当材料做成的底垫、通风设施、防虫、防鼠、防霉、防污染、防潮、排水设施, 符合要求的照明设施及消防设施。在库房温湿度不符合要求时, 要采取适当措施。



DEVICE EXCEPTION HANDLING 设备异常处理



出现(蓝牙连接异常)等待主机连接中或正在连接蓝牙时

- 1.首先检查ipad蓝牙是否打开。
- 2.检查设备是否通电，设备通电后logo指示灯会自然亮起。
- 3.两种都未出现异常的情况下，请检查登录的账户是否和设备匹配。

网络异常

- 1.出现分析速度慢的时候请退出美测MC操作软件检查ipad连接网络或切换连接手机个人热点来操作。
(以上问题如无法自行处理请及时与客服和售后取得联系寻求协助解决)

AFTER-SALES SERVICE 售后保修

尊敬的美测用户，为了您的方便使用及享受到专属业务，请仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。

一、用户凭此证明及可享受自购机之日起整机一年的保修服务。在保修期内，产品因质量问题所导致的零配件损坏或者机器故障，均可免费更换配件及维修。

二、保修期内如有以下情况，均不能享受免费保修服务；

- 1.由于用户处理不细心、自行修理或更改导致的故障；
- 2.由来自于非制造商指定的客户中心的技术人员进行修理导致的故障；
- 3.由于移动中的冲击导致的故障或损坏；
- 4.由于非制造商指定的附件或选件导致的故障；
- 5.由于其他自然灾害导致的故障(火灾、盐或水等)；
- 6.使其远离阳光直射或高温和高湿环境；
- 7.非专业人员切勿自行修理、拆卸或改装设备。

三、保修期外及因本(保修须知)第二款内容所引起的零配件损坏或故障，更换或维修均需收费。

四、产品维修后，如三个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可以免费更换配件及维修。



WARRANTY CARD

保修卡

保修卡项目

产品型号	
生产日期	
设备编号	
安装日期	
用户姓名	
用户地址	
用户的话	
设备故障	

维修记录项目

送修日期			
维修中心			
故障处理			
维修日期			
维修人员			
交验日期			

为更好的为您服务，
敬请将产品质量和使用意见反馈给我公司。